

## Guia de Cateter Stylet®

**Nome Técnico**

Guia para colocação de cateter por navegação

**Fabricante**

Brainlab

**Material**

Guia fabricado em aço inoxidável

**Registro na ANVISA**

80042070023



O Guia de Cateter descartável Stylet da Brainlab é projetado para incorporar a navegação na colocação de derivações ou cateteres ventriculares em neurocirurgia, permitindo a sua colocação à mão livre. Rápida e fácil de usar, a geometria dos marcadores passivos é automaticamente reconhecida pela câmera de navegação Brainlab em até 2 metros de distância permitindo uma calibração instantânea. É a única no mercado já pré-calibrada.

**Características técnicas**

- ☒ Pré-calibrada para navegação;
- ☒ Pode ser acoplada em diversos modelos.

**Indicações**

- ☒ Posicionamento de cateteres ventriculares com auxílio de neuronavegação.

**Apresentações disponíveis**

- ☒ Stylet com 1.1mm de diâmetro por 160mm de comprimento.

**Instruções de Uso**

- ☒ Montar o neuronavegador e registrar o paciente normalmente;
- ☒ Retirar o guia fornecido com o cateter;
- ☒ Se necessário, cortar o cateter de forma que o Stylet chegue até o seu final;
- ☒ Colocar o Stylet no interior do cateter;
- ☒ Direcionar os marcadores reflexivos do Stylet para a câmara infravermelha do navegador, até que o Stylet seja reconhecido e a posição do cateter mostrada na tela;
- ☒ Posicionar o cateter com auxílio da navegação;
- ☒ Retirar o Stylet e fixar o cateter normalmente.